

身体の健康のために  
科学と医学で理想的な座りを…

座り仕事の多い人に、是非お勧めしたい、  
ストレスフリーの新感覚クッション

# サニア ACQU クッション



このアクアマットが  
中に入っています。

↑ IN



※写真のアクアマット内液は、  
宣伝のため着色してありますが、  
実際の製品は無色透明です。



## 座圧分散効果!

どのような体型・姿勢にも対応した流体制御型アクアマット内蔵

## 安心・安全!

マット液体は、氷点下30℃でも凍らず、また、3tの重さに耐えられる安心・安全設計です。

## カラーは3色!

好みに合わせて選んでいただけるよう、カラーは3色揃えました。

## 裏面にはズレない生地!


裏面の半分はズレない生地を採用。椅子からズレ落ちる不便を軽減!

## 産学共同研究開発商品!

静岡大学工学部、浜松医科大学との共同研究開発による実験・実証データをもとに  
効果・効能を最大限に活用したクッションです。機能面においても既に実証済みです。  
※特許出願済

■価格:10,290円(税込)



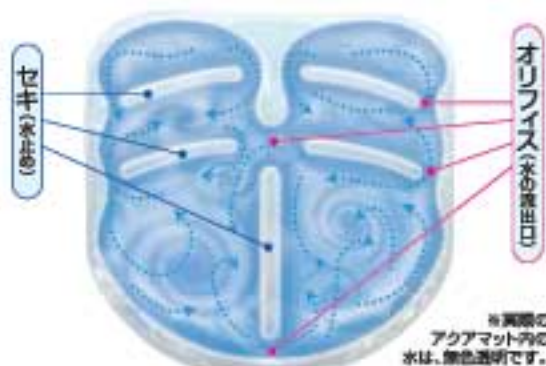

セキとオリフィスで流れの速度をコントロールしています。

## アクアマットと座圧分散効果のしくみ

従来の網入れマットやウレタンマットの場合、荷重が加わっている場所で圧力を受けるので、座圧分散効果は余り得られないが、アクアマットでは荷重が大きくなれば流体が荷重の小さい方へ逃げて、負荷が均一になり、どのような体型でも、どのような姿勢でも座圧分散効果に優れているという点が大きな特徴です。

■従来の網入れマットやウレタンマット




■アクアマット内蔵(流体使用) サニアクッションAQQU



○流体移動によって圧力が分散されます。

## アクアマット未使用時と使用時の比較

○座圧分布状態の比較○

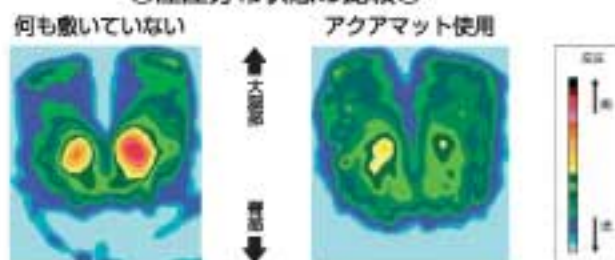

アクアマットが座圧をほどよく分散!  
(静岡大学データより)

## 選べるカラーバリエーション

モトーングレー、スパイシーオレンジ、リーフグリーン。3つのカラーバリエーションから、好みやおオフィスシーンに合わせてお選び下さい。




## 「サニアクッションAQQU」の特性

静岡大学名誉教授 森田信義

水は低きに流れます。「サニアクッションAQQU」にはウォーターマットが内蔵されており、体型や姿勢によって座圧が高くなると、水は低い方へ流れ、座圧を下げます。「サニアクッションAQQU」は座圧分散効果に優れたクッションです。

また、生きている人はゆらいでいます。心臓の鼓動も歩きも「ゆらぎ」です。クッションに座った人の上半身も下半身もわずかにゆらいでいます。「サニアクッションAQQU」ではクッションに座った人の下腿部の「ゆらぎ」に追従して、内部の水がゆらくように水流動されています。「サニアクッションAQQU」は、人の「ゆらぎ」にフィットした快適クッションです。

「サニアクッションAQQU」は身体の健康を考慮した、産学共同開発によって誕生した商品です。

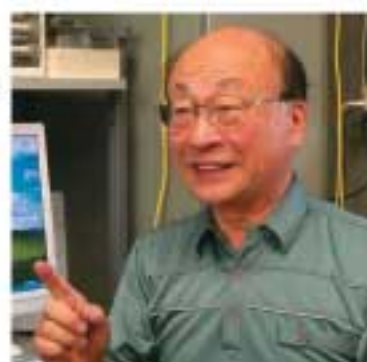

### 研究開発プロジェクトメンバー

静岡大学名誉教授	森田信義
静岡大学工学部教授	高野孝夫
静岡大学院生	鈴木紀之
浜松医科大学准教授	美津高隆
浜松医科大学助手	山内克哉
ウォーキングDAY	高野純一

## 製品仕様

名称	サニアクッションAQQU
横幅	41.5cm
奥行	40.0cm
厚さ	3.0cm
重量	約1.1kg
表地材質	ポリエステル100%
裏地材質	ポリエステル100% (滑り止め材:ウレタン樹脂コーティング)
クッション材質	ポリウレタン
アクアマット	PE、水(食品添加物用プロピレングリコール40%)

●掲載されている商品は、印刷のため実際と異なる場合があります。  
●本製品は、改良のため仕様の一部を予告なく変更させて頂く場合がありますのであらかじめご了承ください。

製造元

**Sania サニア工業株式会社**

●福祉事業部

〒497-0002 愛知県海部郡七宝町大字遠島字上江越1530


☎0120-445-421 FAX.052-441-5478

URL <http://www.sania.co.jp>

## ⚠️ ご使用上の注意

- タバコの火等、火気の近くでは使用しないで下さい。
- クッションの上に鋭く鋭利なものを当てたり、置いたりしないで下さい。中に入っているアクアマットが破損して水が漏れる恐れがあります。
- クッションを落としたり、投げたりしないで下さい。
- 中に入っているアクアマットは、通常の使い方では破損しない設計になっていますが、万一水が漏れた場合は、ただちに使用をおやめ下さい。

## お手入れ方法

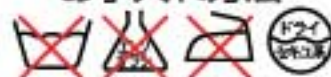

- 表カバーは、汚れたら石油系ドライクリーニングにてお手入れしてください。
- 中に入っているウレタンは洗わないでください。
- 湿った状態で、他のものごとすり合わせると色が移る恐れがあります。

JANコード (メーカーコード: 4580168)

ブラック	オレンジ	グリーン
920168	920175	920182

日本製