

身体<sup>ノ</sup>健康<sup>ノ</sup>ため<sup>ニ</sup>科学<sup>ト</sup>医学<sup>ヲ</sup>で理想<sup>的</sup>な座<sup>り</sup>を...

お尻<sup>ノ</sup>が痛<sup>く</sup>なり<sup>にく</sup>いアクアマ<sup>ット</sup>入<sup>り</sup>快<sup>適</sup>ク<sup>ッ</sup>シ<sup>ョ</sup>ン

# 特等席アクア

T O K U T O U S E K I - A Q U A

## 座圧分散効果!

どのような体型・姿勢にも対応した流体制御型アクアマットです。

## 安心・安全!

マット液体は、氷点下30℃でも凍らず、また、3tの重さに耐えられる安心・安全設計です。

## おしゃれ感のあるデザイン!

おしゃれなデザインは骨盤安定設計。また、冬場に備えて携帯カイロが入るポケット付。

## ズレない・滑らない・動かない!

表面は通気性にすぐれたメッシュ生地、前ズレ部分と裏面にはズレない生地の採用で安心・快適。

## 産学共同研究開発商品!

さまざまな実験・実証データをもとに効果・効能を最大限に活用したアクアマットです。また、機能面においても既に実証済みです。

※特許出願済



このアクアマットが中に入っています。

※写真のアクアマット内の水は、表現のため着色してありますが、実際の製品は無色透明です。

介護保険  
福祉用具

特等席アクア

■座圧分散マット

■価格:18,900円(税込)

JANコード:4580168920151

■TAISコード:00774-000007




# どのような体型、姿勢にも対応する、座圧分散効果のあるアクアマット

水(PG40%)をセキとオリフィスでコントロールしているため、体型・姿勢に合わせ座圧が同じ程度になる座圧分散効果があります。低反発マットでは沈みこみが大きく戻りも遅く、空気マットは空気の戻りが早すぎるため、座がふらつき、安定性がありません。アクアマットは、人の動きよりもわずかに遅れて動くので、人にとっては心地よい感じがし、安定性もあります。

いつも圧力が分散した状態です。



姿勢が崩れていても、マットが柔軟にフィットし圧力が分散されます。

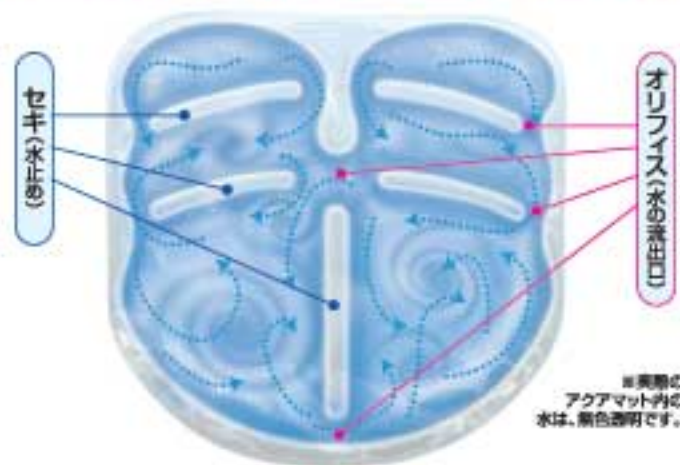


## アクアマット未使用時と使用時の比較

### ●座圧分布状態の比較●

何も敷いていない

アクアマット使用

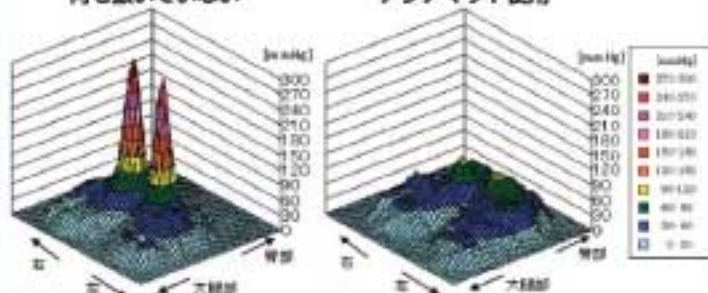

### ●姿勢変化に伴う座圧最大値(mmHg)●




## 「特等席アクア」の特性

静岡大学名誉教授 森田信義

水は低きに流れます。「特等席アクア」にはウォーターマットが内蔵されており、体型や姿勢によって座圧が高くなると、水は低い方へ流れ、座圧を下げます。「特等席アクア」は座圧分散効果に優れたクッションです。

また、生きている人はゆらいでいます。心臓の鼓動も歩きも「ゆらぎ」です。クッションに座った人の上半身も下半身もわずかにゆらいでいます。「特等席アクア」ではクッションに座った人の下腿部の「ゆらぎ」に追従して、内部の水がゆらぐように水流制御されています。「特等席アクア」は、人の「ゆらぎ」にフィットした快適クッションです。

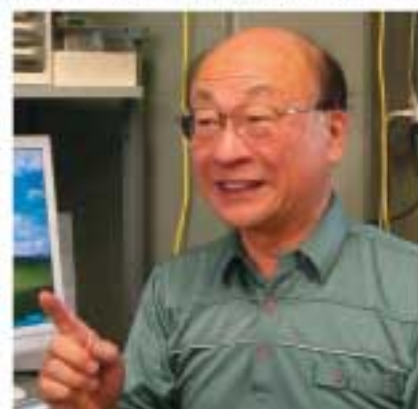

### 研究開発プロジェクトメンバー

- 静岡大学名誉教授 森田信義
- 静岡大学工学部教授 鳥居孝夫
- 静岡大学院生 鈴木紀之
- 浜松医科大学准教授 美津島隆
- 浜松医科大学助手 山内克哉
- ウォーキングDAY 高野純一

## ■製品仕様

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 名称      | 特等席アクア                             |
| 横幅      | 410mm                              |
| 奥行      | 410mm                              |
| 厚さ      | 60mm                               |
| 重量      | 約1.2kg                             |
| 表地材質    | ポリエステル100%                         |
| 裏地材質    | ポリエステル100%<br>(滑り止め材:ウレタン樹脂コーティング) |
| クッション材質 | ポリウレタン                             |
| アクアマット  | PE、水(PG40%)                        |

●掲載されている商品は、印刷のため実際と異なる場合があります。  
●本製品は、改良のための仕様の一部を予告なく変更させて頂く場合がありますのであらかじめご了承ください。



お申し込み・お問合せは

製造元  
**Sania サニア工業株式会社**

●福祉事業部

〒497-0002 愛知県海部郡七宝町大字遠島字上江越1530

☎0120-445-421 FAX.052-441-5478

URL <http://www.sania.co.jp>